

NÁVOD K POUŽITÍ

SLOŽENÍ

Tento nástroj je vyroben z nikl-titanové slitiny tepelně upravené žíháním (metoda AHT) s obchodním označením Fire-Wire™.

Indikace pro použití nástroje Edge GlidePath™

• Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou určeny k vytvoření hladké cesty před použitím libovolných rotačních endo nástrojů nebo endo nástrojů s recipročním pohybem.

Kontraindikace

- Obdobně jako všechny ostatní endodontické nástroje s mechanickým pohonem nejsou tyto endo nástroje určeny k použití v kanálcích s nepříznivým zakřivením.
- Tento produkt obsahuje nikl, a proto nesmí být používán u osob se známou alergickou citlivostí na tento kov.

Výstraha

- Vždy je třeba použít kofferdamový systém.
- Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou sterilizované a není nutné je před použitím sterilizovat v autoklávu.
- Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou určeny pouze pro jedno použití, jinak může dojít k zalomení nástroje.
- Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Bezpečnostní opatření při použití:

Dokud se neseznámíte se všemi novými produkty, dbejte opatrnosti a dodržujte následující důležité body:

- 1) Pro rotační endo nástroje používejte endodontické násadce.
- 2) Nastavte 300–500 otáček za minutu.
- 3) Připravte přímočarý vstup pro všechny rotační endo nástroje včetně nástrojů EdgeFind™.
- 4) Endo nástroje do kanálků netlačte silou, používejte jen minimální tlak.
- 5) Během používání často čistěte žlábký.
- 6) Během používání používejte často hojné množství výplachu a lubrikace.
- 7) Dbejte opatrnosti při opracování apikálních a zakřivených oblastí kanálku.
- 8) Rotační endo nástroje jsou nástroje pro použití vždy jen u jednoho pacienta.

Nežádoucí účinky

- Prasknutí/zlomený nástroj
- Infekce – Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený, hrozí riziko infekce.
- Komplikace často spojené s endodontickými zákroky:
 - Bolest
 - Prasknutí/zlomení nástroje
 - Poškození/krvácení měkké tkáně

POKYNY PRO POUŽITÍ

Vytvoření počátečního tvaru pomocí Edge GlidePath™

- Připravte přímočarý vstup.
- Vytvořte GlidePath s pomocí nerezového endo nástroje K-File ISO 8 a ISO 10. Použijte EdgeLube™ 17% EDTA a EdgeGel™ 19% EDTA.
- Určete pracovní délku endo nástroje K-File ISO 10 pomocí rentgenových snímků nebo apexlokátoru.
- Začněte s endo nástrojem EdgeFind™ P1 ISO 13, zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.
- Dále pokračujte s endo nástrojem EdgeFind™ P2 ISO 16, zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.
- Dokončete s endo nástrojem EdgeFind™ P3 ISO 19, zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.
- Nyní začněte tvarovat kanálek pomocí nikl-titanových rotačních endo nástrojů EdgeEndo.

Dezinfekce:

- Po úplném vytvarování každého kanálku vyplachujte kanálky po dobu 1 minuty 17% roztokem EDTA, aby se z nich odstranila vrstva mazu.
- Vyplachujte kanálky po dobu 5 minut 5% roztokem NaOCl – tím odstraníte zbylé nečistoty a bakterie.
- Vyplachujte kanálky po dobu 1 minuty 17% roztokem EDTA za účelem odstranění předchozího 5% roztoku NaOCl.
- Vyplachujte kanálky po dobu 5 minut 2% roztokem chlorhexidinu nebo EDTA s cílem zahubit zbylé bakterie.

Obturbace kořenových kanálků

- Pokud použijete systém tepelného nosiče, použijte k určení vhodné velikosti tepelného nosiče přípravky pro ověření velikosti.
- Pokud použijete hlavní gutaperčový kónus odpovídající největšímu endo nástroji, který se podařilo zavést v plné délce, mějte na paměti, že v některých případech se může stát, že když gutaperču odpovídající poslednímu použitému endo nástroji nelze zavést v celé délce, je nutné sáhnout po

CZ Rev A 03/2021



kónusu menší velikosti.

Skladování

- Skladujte při pokojové teplotě 10 – 37,8 °C, mimo dosah slunečního záření.

Doporučená likvidace endopilníků

Endo nástroje uložte do kontejneru na biologicky kontaminovaný odpad.

Symbol	Význam (příp. norma)
	Výrobce (ISO 15223-1)
REF	Katalogové číslo (ISO 15223-1)
LOT	Číslo šarže (ISO 15223-1)
	Doba použitelnosti (ISO 15223-1)
	Jednorázové (ISO 15223-1)
	Nepoužívejte, je-li obal poškozen (ISO 15223-1)
	Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1)
RX Only	Upozornění: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení pouze zubním lékařům / lékařům (nebo na jejich objednávku) s náležitou licenci, udělenou v souladu se zákonem státu, ve kterém tento vykonává praxi nebo zařízení používá. (FDA 21 CFR 1 Část 801.109 (b) (1))
STERILE R	Sterilizace s použitím záření (ISO 15223-1)
	Upozornění (ISO 15223-1)
	Teplotní omezení (ISO 15223-1)