

WSKAZÓWKI UŻYCIA

Ćwieki gutaperkowe stanowią materiał do wypełniania kanałów korzeniowych. Są one przeznaczone do wypełniania oczyszczonych, opracowanych i przepłukanych przestrzeni kanałów korzeniowych.

- Z uwagi na łatwość wypełniania, dzięki prostszej i szybszej obturacji kanałów korzeniowych uzyskuje się oszczędność czasu.
- Stała zbieżność i rozmiary
- Dostępne są znaczniki długości
- Doskonała nieprzepuszczalność dla promieniowania
- Gwarantowany długi okres składowania i świeżości produktu
- Produkt nadaje się do kondensacji pionowej i bocznej.

Wskazania i cele zastosowania

1. Ćwiek gutaperkowy stanowi integralny materiał stosowany do promowania okołowierzchołkowego leczenia zębów oraz zapobieganiu rozwoju choroby.
2. System terapii endodontycznej z użyciem wypełnienia w postaci ćwieka gutaperkowego, zapewniającego nieprzepuszczalność dla cieczy oraz bakterii.

Instrukcje użycia

1. Kanał korzeniowy należy opracować za pomocą pilnika.
2. Po oczyszczeniu i osuszeniu kanału za pomocą roztworu EDTA, na ściankę kanału korzeniowego należy zaaplikować uszczelniacz za pomocą ćwieków papierowych.
3. Należy wybrać główny ćwiek gutaperkowy, dopasowany do opracowanego kanału korzeniowego.
4. Ćwiek gutaperkowy należy przepłukać za pomocą roztworu dezynfekcyjnego NaOCl o stężeniu 5,25%.
5. Ćwieki główne należy wprowadzać w głąb kanału korzeniowego na całą jego długość.
6. Ćwieki pomocnicze należy wprowadzić do kanału korzeniowego za pomocą rozpychacza palcowego.
7. Prawdliwość wypełnienia należy potwierdzić za pomocą prześwietlenia RTG.

Ostrożność

1. Nie używać tego produktu w odniesieniu do jakichkolwiek pacjentów, u których wywołuje on reakcje nadwrażliwe, takie jak wysypka, zapalenie skóry itp.

2. Niektórzy pacjenci wykazują reakcje alergiczne oraz/ lub doświadczają nadwrażliwości na materiały zawierające trans-1,4-poliizopren. U takich pacjentów produktu tego stosować nie wolno.
3. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do kontaktu z tkankami wewnątrz jamy ustnej. Należy zachować ostrożność i zapobiegać kontaktowi produktu z oczami. Jeżeli materiał wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, skażone miejsca należy przepłukać natychmiast dużą ilością wody i następnie należy skontaktować się z lekarzem.
4. Osobom, które nie dysponują specjalistyczną wiedzą, produktem tym posługiwać się nie wolno. Produktu tego nie wolno stosować do jakichkolwiek innych celów, aniżeli zgodnych z przeznaczeniem.
5. Produktu tego nie wolno przepisywać jako leku do stosowania wewnętrznego.
6. Należy zachować ostrożność i unikać nadmiernego wypełniania oraz pozostawiania martwych przestrzeni.
7. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zawnoczu chronić drogi oddechowe.
8. Po użyciu należy zawsze zamykać wieczko.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej pomiędzy 1°C~30°C, z dala od wszelkiego promieniowania słonecznego

Dopuszczalny okres składowania

4 lata od daty produkcji

Dobór obturatora

Po prawidłowym ukształtowaniu, czyszczeniu, dezynfekcji oraz potwierdzeniu długości roboczej za pomocą lokalizacji radiograficznej oraz/lub lokalizatora wierzchołka, prawidłową wielkość obturatora należy ustalić za pomocą weryfikatorów rozmiaru.

Należy wybrać obturator EdgeCore™ o tym samym rozmiarze, co weryfikator rozmiaru, który biernie dopasowuje się do długości roboczej opracowanego kanału. W celu upewnienia się, że weryfikatory rozmiaru znajdują się na odpowiedniej długości należy posługiwać się widniejącymi na nich znacznikami milimetrowymi. W większości przypadków weryfikator rozmiaru będzie odpowiadał największemu pilnikowi wprowadzonemu na długość roboczą. Jednakże

W niektórych przypadkach można stwierdzić, że weryfikator rozmiaru, który pasuje najlepiej do długości roboczej ma rozmiar mniejszy lub większy od największego pilnika użytego do opracowania długości roboczej. Należy wybrać obturator, odpowiadający weryfikatorowi, który biernie dopasowuje się do długości roboczej opracowanego kanału.

Symbol	Znaczenie (norma, w stosownych przypadkach)
	Producent/ Producent legalny (ISO 15223-1)
	Data produkcji (ISO 15223-1)
REF	Numer katalogowy (ISO 15223-1)
LOT	Kod partii materiałowej (ISO 15223-1)
CE 1639	Symbol CE oraz numer identyfikacyjny
	Przechowywać z dala od światła słonecznego (ISO 15223-1)
	Nie używać ponownie (ISO 15223-1)
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 15223-1)
	Uwaga (ISO 15223-1)
	Ograniczenia temperaturowe (ISO 15223-1)
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel WE
	Zużyć do dnia (ISO 15223-1)

 Wyprodukowano przez **META BIOMED CO LTD**

Osong Factory

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Korea
Tel.: +82-43-216-0433 / Faks: +82-43-217-1988.
Adres mailowy: info@meta-biomed.com
Strona internetowa: <http://www.meta-biomed.com>

EC REP

Meta Biomed Europe GmbH

Wiesenstr. 35, DE 45473 Mülheim an der Ruhr,
Niemcy
Tel.: +49-208-30991910
Faks: +49-208-3099199