

## Mode d'emploi des pointes de papier

- Roulés à la main pour une meilleure absorption
- Extrêmement absorbants
- Papier-tiges disponibles avec marquage de longueur
- Différents formats et emballages disponibles
- Codage couleur

## Indication et objectif

Les papiers-tiges sont utilisés pour sécher les canaux radiculaires avant l'obturation et pour nettoyer les canaux radiculaires qui scellés lors des traitements endodontiques.

## Mode d'emploi

1. Mesurer la longueur du canal radiculaire
2. Sélectionner des papiers-tiges de la même taille pour la formation du canal radiculaire.
3. Le canal radiculaire utilise des papiers-tiges pour sécher.
4. Environ 10 à 15 papiers-tiges sont nécessaires par canal radiculaire.
5. Le scellant ou le ciment est appliqué à l'aide de papier-tiges

## Précautions

1. Utiliser uniquement des papiers-tiges stérilisés.
2. Ne pas utiliser de papiers-tiges pliés ou cassés.
3. Eviter le débordement ou les espaces morts lors de l'application de scellant ou de ciment.
4. Utiliser le scellant ou le ciment immédiatement après la préparation.

5. Après avoir utilisé des papiers-tiges, il faut conserver la boîte dans un endroit frais.
6. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
7. Ne pas réutiliser pour prévenir des infections croisées. (Infections secondaires comme les pathogènes et virus causées par la salive et le sang.)

## Conservation

Conserver à température ambiante 1°C et 30°C

## Durée de conservation

5 ans à compter de la date de fabrication.



Fabrique par **META BIOMED CO LTD**

### Usine d'Osong

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Corée

Tél. : +82-43-216-0433 / Fax : +82-43-217-1988

Courriel : [info@meta-biomed.com](mailto:info@meta-biomed.com)

Site Internet : <http://www.meta-biomed.com>










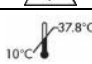
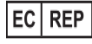





**Meta Biomed Europe GmbH**

Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, Allemagne

Tél. : +49-208-30991910

Télécopie : +49-208-3099199

Symbole	Signification (standard, le cas échéant)
	Fabricant / Fabricant légal (ISO 15223-1)
	Date de fabrication (ISO 15223-1)
	Numéro de catalogue (ISO 15223-1)
	Code de lot (ISO 15223-1)
 1639	Marque CE et numéro d'identification
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil (ISO 15223-1)
	Ne pas réutiliser (ISO 15223-1)
	Consulter le mode d'emploi (ISO 15223-1)
	Mise en garde (ISO 15223-1)
 10°C - 37.8°C	Limitations de température (ISO 15223-1)
	Rep. CE autorisé (ISO 15223-1)
	Date de péremption (ISO 15223-1)
	Ne pas restériliser (ISO 15223-1)
	Stérilisé par irradiation (ISO 15223-1)