

## BRUGSANVISNING

## GUTTA PERCHA POINTS

### Håndrullede endodontiske points

Bruges til fyldning af en forberedt rodkanal før tandrestaurering.

### Sammensætning

Guttaperka, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Bariumsulfat, Farvestof

### Anvendelse

1. Kontroller, om produktet er beskadiget, om det indeholder urenheder, og om formen egner sig til anvendelse.
2. Kontroller, at produktet ikke er udløbet.
3. Efter behandlingen af den beskadigede tands rodkanal bruges guttaperka i den rette størrelse til fyldning.
4. Dette produkt er til engangsbrug og skal bortskaffes efter brug.

### Tilsigtet formål

1. Tilsigtet anvendelse: Bruges til at fylde en forberedt rodkanal før tandrestaurering.
2. Indikation: Bruges til at fylde en forberedt rodkanal før tandrestaurering.
3. Kontraindikation: Må ikke anvendes til patienter, der er allergiske over for dette produkt.
4. Patientgruppe: alle aldersgrupper
5. Påtænkt bruger: tandlæge
6. Bivirkninger: Der er ikke blevet rapporteret om bivirkninger.
7. Potentiel risiko ved genbrug: Genbrug af en brugt guttaperkapoint kan forårsage betændelse.
8. Kan bruges sammen med forseglers eller cement og skal bruges under tandlægens opsyn i overensstemmelse med den kliniske indikation.
9. Anordning til engangsbrug

### Forholdsregler

1. Må kun anvendes af tandlægen.
2. Må ikke anvendes, hvis produktet er udløbet.
3. Før anvendelsen skal der kontrolleres for infektion i rodkanalen.
4. Må ikke bruges til en patient, der er allergisk over for dette produkt.

### Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys.


### Bortskaffelse

Indholdet/forpakningen bortskaffes i overensstemmelse med de relaterede forordninger i landet.

**Holdbarhed** 4 år fra fremstillingsdatoen

**Røntgenabsorption** Svarende til 6 mm trinkile af aluminium

### Symboler

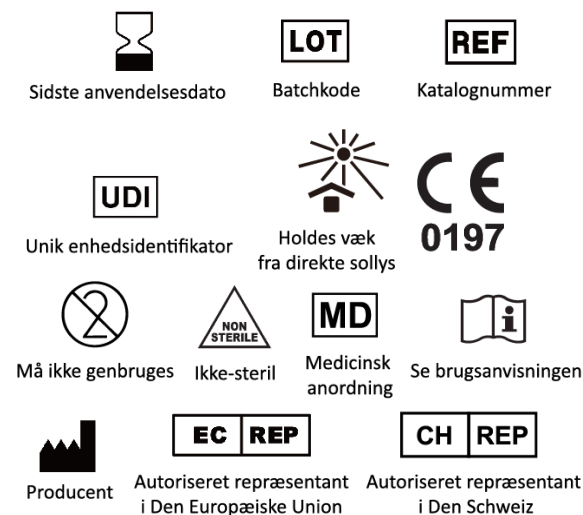

### SURE DENT CORPORATION (Producent)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

### AUTORISERET REPRÆSENTANT

**Evropa - OBELIS S.A** Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgien

**Švýcarsko - OBELIS GmbH** - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Schweiz

■ I tilfælde af enhver alvorlig hændelse, der måtte være sket med relation til enheden, bedes du rapportere dette til producenten og den kompetente myndighed i det Medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er baseret.

■ SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) kan downloades på <http://www.suredent.com>.

■ Størrelsesangivelse og længde Du bedes kontakte producenten for at forhøre dig om størrelsesangivelse og længde.

