

CONSIGNES D'UTILISATION

GUTTA PERCHA POINTS

Pointes endodontiques roulées à la main

Utilisé pour le comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.

Composition

Gutta-percha, Oxyde de zinc, Oxyde de Zirconium, Sulfate de baryum, Agent colorant

Application

1. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé, qu'il ne contient pas d'impuretés et que sa forme est adaptée à son utilisation.
2. Vérifiez si la date de péremption du produit est respectée.
3. Après avoir traité le canal radiculaire de la dent abîmée, utilisez de la gutta percha de taille appropriée pour l'obturer.
4. Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation.

Utilisation prescrite

1. Utilisation prescrite : comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.
2. Indication : comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.
3. Contre-indications :
Ne pas utiliser sur les patients allergiques à ce produit.
4. Type de patient : Tous les groupes d'âge
5. Utilisateur prévu : Dentiste
6. Effets secondaires/effets indésirables : Aucun effet secondaire ou effet indésirable n'a été signalé.
7. Risque potentiel en cas de réutilisation : La réutilisation d'une pointe de Gutta percha déjà utilisée peut provoquer une inflammation.
8. Peut être utilisé avec un scellant ou un ciment et doit être utilisé sous le contrôle d'un dentiste conformément à l'indication clinique.
9. Dispositif à usage unique

Précaution

1. Ne pas utiliser en dehors des soins dentaires spécialisés.
2. Ne pas utiliser si le produit est périmé.
3. Avant utilisation, vérifier l'absence d'infection à l'intérieur du canal radiculaire.
4. Ne pas utiliser sur les patients allergiques à ce produit.

Stockage


Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Élimination des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.

La durée de conservation : 4 ans à compter de la date de fabrication.

Radio-opaque : Équivalent à un Step Wedge en aluminium de 6 mm

Symboles

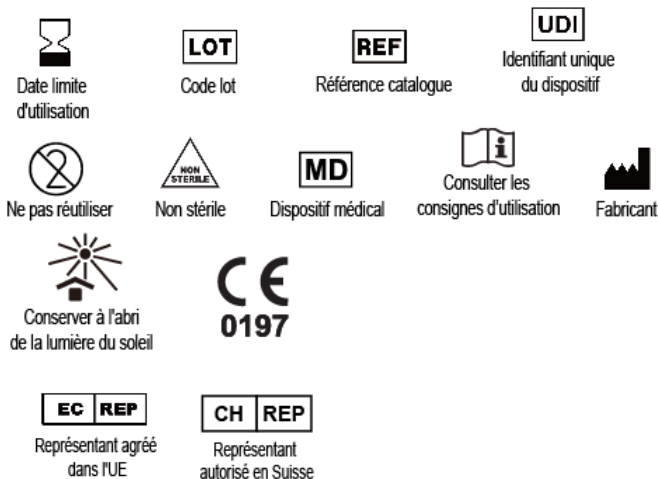

SURE DENT CORPORATION (Fabricant)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud
Tél : +82-31-737-4720 Fax : +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

Représentant Agrée

Europe - OBELIS S.A. - Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Switzerland - Obelis GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

■ En cas d'incident grave survenu en rapport avec le dispositif, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

■ Le SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) peut être téléchargé sur <http://www.suredent.com>.

■ Désignation de la taille et longueur : Veuillez nous contacter pour la désignation de la taille et la longueur.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®